

Neotech ChinStrap – pasek podbródkowy

Pasek podbródkowy dla CPAP




Właściwości i zalety:

- Wykonane z unikalnego materiału NeoFoam™, miękkiego oraz przyjaznego dla skóry
- Materiał oddychający i przepuszczający pot
- Podzielony kształt Chinstrap obejmujący podbródek, pozwala uzyskać komfort i stabilność zuchwy.
- Nie przesuwają się do przodu ani do tyłu

Nr katalogowy	Rozmiar	Obwód
N785	Mikro / Micro	28 cm – 35 cm
N786	Mały / Small	33 cm – 42 cm
N787	Duży / Large	36 cm – 46 cm

NeoSeal™

plastry do ochrony nosa noworodka przy wentylacji donosowej

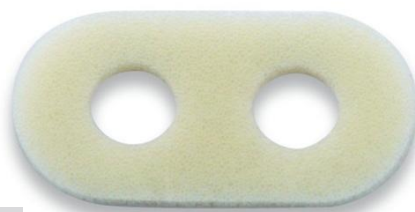

Właściwości i zalety:

- Chroni delikatną skórę przegrody nosowej i nozdrzy
- Poprawia uszczelnienie, utrzymując skuteczność CPAP oraz Bubble CPAP
- Może być stosowany z większością wążów tlenowych dla systemów CPAP lub Bubble CPAP
- Przyjazny dla opieki rozwojowej
- Ekonomiczny
- Łatwe stosowanie
- Nie zawiera lateksu, ftalanów (DEHP i BPA)

Nr katalogowy	Rozmiar	Ilość
N421	Mały / Small	150 szt. / op.

Produkt jednorazowego użytku

NeoSeal™ - wskazówki stosowania



Krok 1

Usuń osłonkę NeoSeal

Krok 2

Nałóż stronę przylepną na wazy tlenowe (kaniulę)

Krok 3

Umocuj wazy tlenowe (kaniulę) zgodnie z procedurą obowiązującą w szpitalu

OSTRZEŻENIE:

- Zaleca się wymianę produktu co 3 do 5 dni
- Pacjent musi być pod opieką profesjonalisty
- Należy natychmiast przerwać stosowanie produktu, jeżeli wystąpi podrażnienie skóry.
- Produkt może być stosowany wyłącznie przez lekarza lub na jego zlecenie



Neotech ChinStrap™ – wskazówki stosowania



Krok 1

Nałóż stabilizator paskami mocującymi w stronę szyi.

Krok 2

Upewnij się, iż większy pasek jest pod brodą a mniejszy pasek jest na brodzie.

Krok 3

Małżowiny uszne mają znajdować się w otworach stabilizatora.

Krok 4

Mocowanie ma znajdować się na tylnej części potylicy.

Krok 5

Przytnij pasek względem wymagań

ZALECENIA:

- Zaleca się wymianę produktu co 3 do 5 dni
- Pacjent musi być pod opieką profesjonalisty
- Należy natychmiast przerwać stosowanie produktu, jeżeli wystąpi podrażnienie skóry.
- Produkt może być stosowany wyłącznie przez lekarza lub na jego zlecenie

