


# Hold-A-Line

Plaster do mocowania pojedynczego cewnika pępowinowego

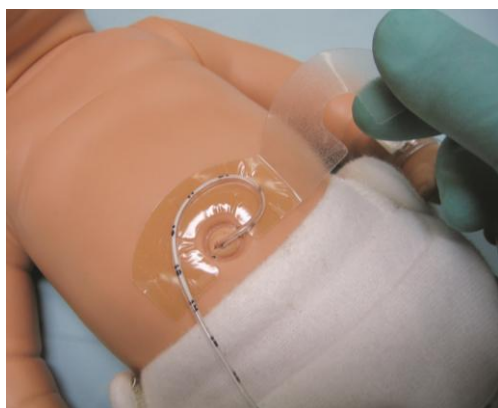

#### Właściwości i zalety

- Możliwość wielokrotnego przyklejania i odklejania części trzymającej cewnik
- Mocowanie do skóry za pomocą plastra hydrokolidowego
- Unikalny kształt pozwala na mocowanie nawet w przypadku szerokich kikutów pępowinowych
- Łatwo dostosowuje się do każdego rozmiaru
- Zmniejsza naprężenia wywierane na cewnik

Nr katalogowy	Rozmiar	Ilość
N705	Standard	40 szt. / op.

Plaster zapobiega samoistnemu wysunięciu cewnika pępowinowego przy czynnościach pielęgnacyjnych



Patent Pending

Made in USA

## Hold-A-Line – wskazówki stosowania

Oczyść i osusz skórę zgodnie z szpitalnymi procedurami. **Nie używaj alkoholu.**

### Krok 1

Nie zdejmując przezroczystej osłonki, rozgrzej produkt w rękach przez 60 sekund.

### Krok 2

Zdejmij warstwę zabezpieczającą z bazowego plastra hydrokoloidowego.

**WAŻNE:** Skóra musi być całkowicie pozbawiona wilgoci.

### Krok 3

Przyklej plaster do pacjenta warstwą hydroloidową i przytrzymaj przez 60 sekund.

**WAŻNE:** Ciepło powoduje lepsze przyleganie plastra do skóry.

### Krok 4

Usuń osłonkę z wierzchniej części plastra.

**WAŻNE:** Po tym jak plaster został przytrzymany przez 60 sekund.

### Krok 5


Nałożyć płatek przykrywający na plaster bazowy.

**WAŻNE:** Aby właściwie nałożyć płatek, przytrzymać palcem plaster bazowy i pociągnąć za niebieską końcówkę. Podłączyć odpowiednio cewnik i umocować płatek przykrywający z powrotem na plastrze bazowym.

### Krok 6

Aby usunąć plaster, należy lekko zwilżyć wacik wodą lub solą fizjologiczną i delikatnie odkleić plaster od skóry.

**Uwaga:** Produkt powinien być stosowany przez lekarza lub na jego zlecenie. Zaprześcić stosowania natychmiast, jeśli wystąpi podrażnienie skóry.

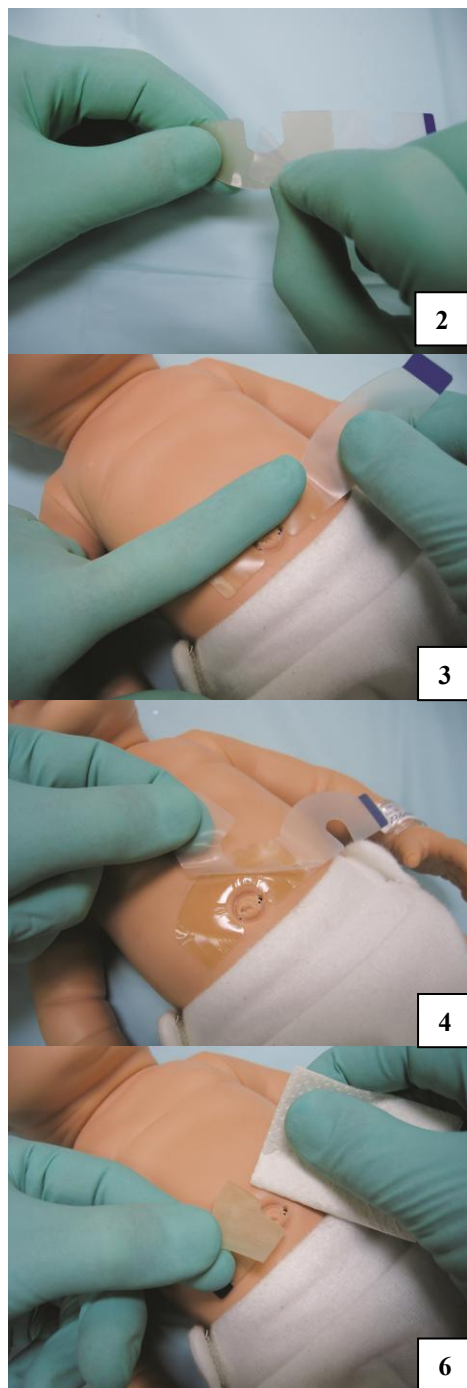

Produkt jednorazowego użytku