


NeoBond[®]

Plastry hydrokoloidowe mogą być stosowane zamiast nieprzyjaznych tradycyjnych plastrów

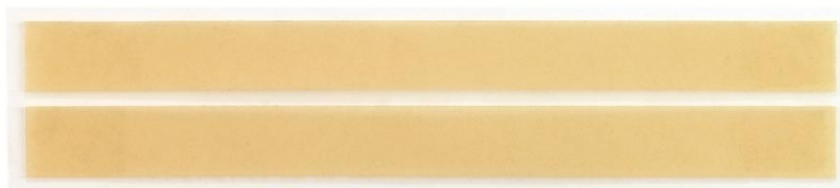

Właściwości i zalety

- Zapewnia długotrwałe przyleganie, zapobiegając podrażnieniu naskórka
- Nie pozostawia śladów na skórze

Nr katalogowy	Rozmiar	Ilość
N741	Standard	50 szt. / op.
Każde pojedyncze opakowanie zawiera dwa plastry o wymiarach 1,27 cm na 15,24 cm		



Made in USA

NeoBond® – wskazówki stosowania



Krok 1:

Oczyść i osusz skórę zgodnie z protokołem szpitalnym.

Wskazówka: Aby osłona dobrze przylegała, ważne jest dokładne oczyszczenie i osuszenie skóry. Wilgoć, olejki i balsamy utrudniają przyleganie hydrożelu do skóry. Nie jest wymagane ani zalecane specjalne przygotowanie skóry.

Nie stosować alkoholu.

Krok 2:

Nie zdejmując przezroczystej folii ogrzewać produkt trzymając go w dłoniach przez 60 sekund. Można potrzymać go również pod inkubatorem lub ogrzewaczem do pięt.



Krok 3

Zdjąć warstwę zabezpieczającą z plastra NeoBond®.

Krok 4

Umieścić NeoBond w odpowiednim miejscu na skórze. Przytrzymać palcem w miejscu przez co najmniej 60 sekund, aby zapewnić dobre przyleganie. Ciepło wpływa na lepsze wiązanie między produktem a skórą pacjenta.

Krok 5:

Usuwanie: Nawilżyć powierzchnię wodą, delikatnie odrywać od skóry zwilżając wacikiem nasączonym wodą. Można użyć również mydła lub oleju mineralnego.

Uwaga: Pacjent musi być pod profesjonalnym nadzorem.

Natychmiast przerwać, jeśli wystąpi podrażnienie skóry. Produkt powinien być stosowany przez lekarza lub na jego zlecenie.

Produkt jednorazowego użytku

