


NeoPulse

Lekka, regulowana opaska pulsoksymetryczna jednorazowego użytku

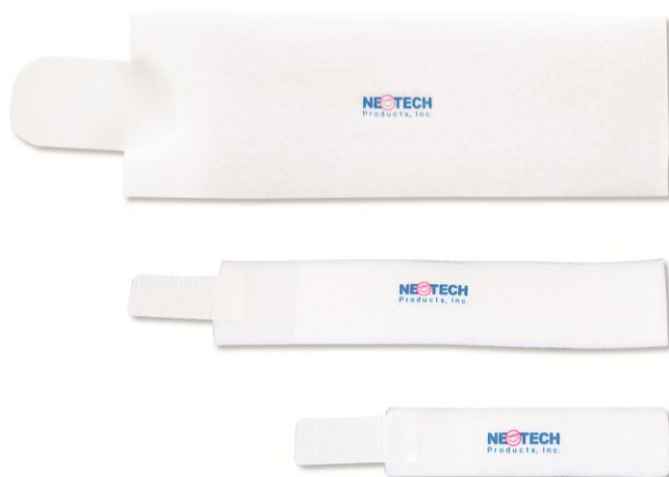

Właściwości i zalety

- Wykonana z unikalnej opatentowanej pianki NeoFoam[®]
- Mięka i wyjątkowo przyjazna dla skóry
- Łatwo dostosowuje się do każdego rozmiaru kończyny
- Lekka i wygodna
- Nie zsuwa się, zapewniając stałe i pewne połączenie

Nr katalogowy	Rozmiar	Ilość
N781	Mały / Small	100 szt. / op.
N782	Duży / Large	100 szt. / op.
N783	Ekstra Duży / Extra Large	100 szt. / op.

Opaska NeoPulse delikatnie owinięta wokół stopy.

Pulsoksymetr nie jest dołączony



Patent Pending

Made in USA

NeoPulse – wskazówki stosowania



Krok 1

Zastosować czujnik pulsoksymetru zgodnie z protokołem szpitalnym.

Krok 2

Owinąć NeoPulse wokół czujnika pulsoksymetru i zabezpieczyć plastrem Velcro®. Opaskę można przyciąć do odpowiedniego rozmiaru.

Krok 3

Sprawdzić prawidłowość krążenia w owiniętej stopie - nie owijać zbyt ciasno.

Krok 4

Wymieniać opaskę co 5-7 dni.

Produkt jednorazowego użytku



Patent Pending

Made in USA