


EZ-HOLD[®]

Plastry hydrokoloidowe do mocowania kaniul oraz sond

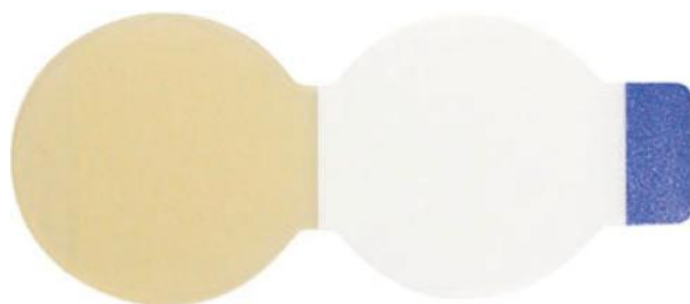

756



757

Właściwości i zalety

- Mocowanie do skóry za pomocą plastra hydrokoloidowego
- Zaginana osłonka redukuje naprężenia wywierane na rurkę
- Idealne rozwiązanie do mocowania kaniul nosowych i sond
- Skala zagłębienia sondy jest widoczna dzięki przezroczystej osłonce plastra
- Łatwe w użyciu
- Skrzydełko może być wielokrotnie przyklejane i odklejane

Nr katalogowy	Rozmiar	Ilość
N756	Mini	100 szt. / op.
N757	Standard	100 szt. / op.


Mini EZ-Hold przymocowany do pacjenta łagodnym hydrokoloidowym plastrem. Kaniula jest zabezpieczona za pomocą osłonki skrzydełka.



Patent #D506,547



EZ-Hold® – wskazówki stosowania

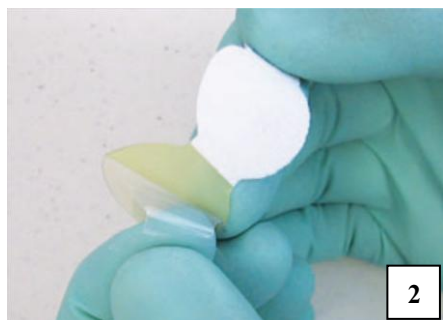

Krok 1:

Nie zdejmując przezroczystej osłonki, rozgrzej produkt w rękach przez 60 sekund. Produkt można również rozgrzać pod bieżącą ciepłą wodą.

Krok 2:

Usuń przezroczystą osłonkę z podstawy.

Wskazówka: Skóra pacjenta musi być czysta i sucha zgodnie z procedurą obowiązującą w szpitalu.



Krok 3

Umieść produkt na skórze i przytrzymaj w miejscu przylegania.

Wskazówka: Przytrzymaj w miejscu przez 60 sekund, aby zapewnić odpowiednie przyleganie.

Krok 4

Usuń osłonkę ze skrzydełka i zawiń wokół kaniuli.

Wskazówka:

Unieś skrzydełko, aby usunąć kaniulę lub zmienić jej położenie.



Krok 5:

Unieś skrzydełko, aby usunąć kaniulę.

Wskazówka: Przecieraj skórę nawilżonym wacikiem z wodą, delikatnie odklejając od skóry pacjenta.

OSTRZEŻENIE: Pacjent musi znajdować się pod nadzorem specjalisty. Należy natychmiast przerwać stosowanie produktu, jeżeli wystąpi podrażnienie skóry. Produkt może być stosowany wyłącznie przez lekarza lub na jego zlecenie.



Produkt jednorazowego użytku