


NeoBridge[®]

Plaster do cewnika pępowinowego ze skrzydełkami

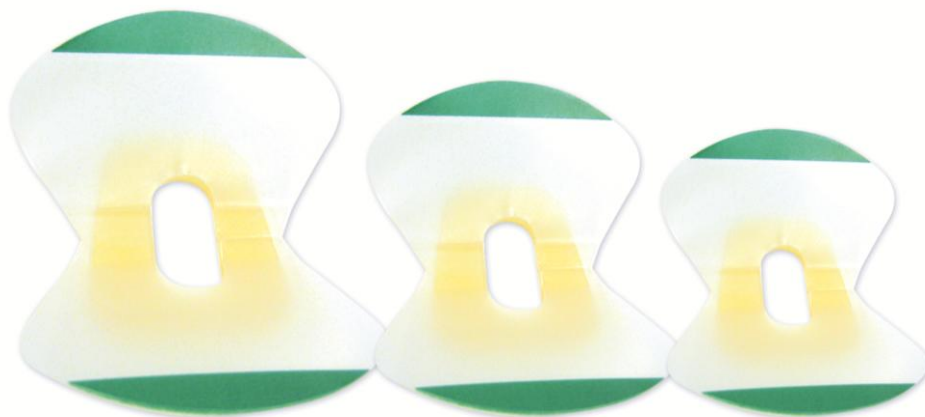

Właściwości i zalety


- Mocowanie do skóry za pomocą plastra hydrokolidowego NeoBond[®]
- Dostępny w trzech rozmiarach
- Skrzydełka plastra mogą być wielokrotnie przyklejane i odklejane
- Plaster zapobiega samoistnemu wysunięciu cewników
- Przystosowany do utrzymania dwóch cewników



NeoBridge przymocowany do pacjenta za pomocą plastra hydrokolidowego utrzymuje cewniki pomiędzy skrzydełkami

Nr katalogowy	Rozmiar	Przybliżona masa ciała [g]	Ilość
N700	Mikro / Micro	800 lub mniej	20 szt. / op.
N701	Mały / Small	800-1200 g	20 szt. / op.
N702	Duży / Large	1200-2200g	20 szt. / op.

NeoBridge® – wskazówki stosowania

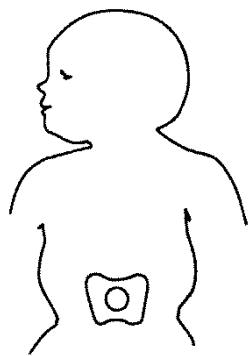


1

PRZYGOTOWANIE

Skóra musi być czysta i sucha zgodnie z procedurami obowiązującymi w szpitalu.

Ważne jest, aby skóra była możliwie jak najbardziej sucha i czysta, w celu umożliwienia prawidłowego przylegania produktu. Wilgoć, olejki lub mleczka do ciała niekorzystnie wpływają na przyleganie hydrokoloidu NeoBond. Żaden podkład nie jest wymagany ani zalecany.

NIE STOSOWAĆ ALKOHOLU

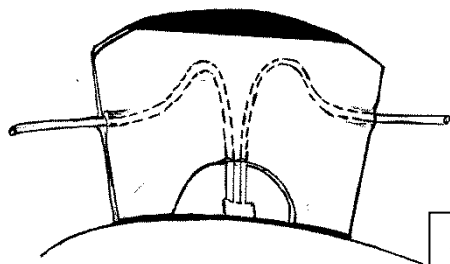


2

SPOSÓB UŻYCIA

Wybierz właściwy rozmiar:

Nr katalogowy	Rozmiar Neobridge	Przybliżona masa ciała [g]
N700	Mikro / Micro	800 lub mniej
N701	Mały / Small	800-1200 g
N702	Duży / Large	1200-2200g

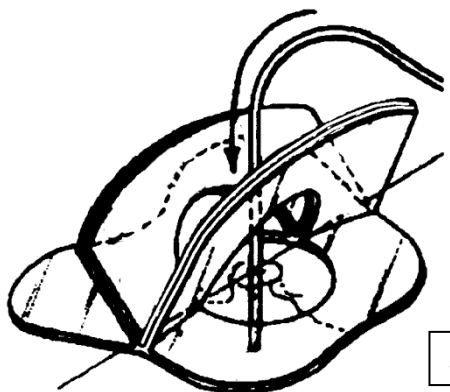


3

1. Usuń osłonkę z podstawy hydrokoloidowej, wsuń cewnik przez bok podstawy i przymocuj podstawę szczelnie do skóry.

Wskazówka: Przytrzymaj w miejscu przez 60 sekund, aby zapewnić prawidłowe przyleganie. Upewnij się, że szerszy koniec jest skierowany w stronę głowy dziecka (rys. 1).

2. Usuń osłonkę z jednego skrzydełka i przyczep do cewnika. (rys. 2).
3. Wykonaj te same czynności z drugim skrzydełkiem, i ściśnij mocno razem z pętlą w cewniku, jak pokazano na rysunku (rys. 3).
4. Przy stosowaniu dwóch cewników pępowinowych, wyprowadź po jednym cewniku z każdej strony NeoBridge i złącz skrzydełka (rys. 4). Aby usunąć jeden cewnik, rozdziel skrzydełka, usuń cewnik i ponownie złącz skrzydełka (rys. 3).

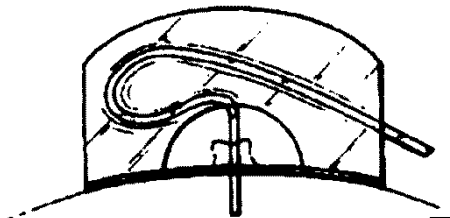

4

USUWANIE

Przy pomocy gazika lub ściereczki i ciepłej wody przecieraj delikatnie skórę usuwając NeoBridge ze skóry pacjenta.

Uwaga: Produkt powinien być stosowany przez lekarza lub na jego zlecenie.

Zaprzestać stosowania natychmiast, jeśli wystąpi podrażnienie skóry.

Produkt jednorazowego użytku