

## NeoShades® z plastrami mocującymi

Okularki ochronne do fototerapii z unikalnym wzorem okularów słonecznych



### Właściwości i zalety

- Nowy, cieńszy, bardzo miękki materiał zapewnia pełen komfort oraz bezpieczeństwo
- Większe blokowanie światła UV
- Mocowanie za pomocą plastrów hydrokoloidowych NeoBond do skóry dziecka
- Nie zmniejszają powierzchni naświetlanej



Nr katalogowy	Rozmiar	Ilość
N724	Mikro / Micro	50 szt. / op.
N725	Mały / Small	50 szt. / op.
N726	Duży / Large	50 szt. / op.

NeoShades z unikalnym wzorem okularów słonecznych, mocowane do pacjenta za pomocą plastrów hydrokoloidowych.



Patent #D410,021; Other International & Domestic Patents Pending



## NeoShades® z plastrem mocującym – wskazówki stosowania



### PRZYGOTOWANIE

1. Oczyszczyć skórę zgodnie z procedurą szpitalną

**Uwaga:** Ważne jest, aby skóra była możliwie jak najbardziej czysta i sucha. Plastry źle przylegają do wilgotnej skóry lub włosów.

2. Dobrać rozmiar odpowiedni dla pacjenta.

### ZASTOSOWANIE

1. Plastry są wstępnie zamocowane do okularków. Należy je odłączyć i przemieścić, umiejscawiając w prawidłowej pozycji na skroniach pacjenta.

2. Nie zdejmując przezroczystej osłony, należy ogrzać produkt trzymając go w dłoniach przez 60 sekund.

3. Oderwać i usunąć przezroczystą osłonę.

4. Nałożyć plastry na skronie.

**Ważne:** Przytrzymać palcem w miejscu przez co najmniej 60 sekund, aby zapewnić dobre przyleganie.

5. Umieścić okularki na oczach i delikatnie umocować je do plastrów. Część plastra pozostaw odsłoniętą w celu łatwiejszego usunięcia.

### USUWANIE

1. Położyć palec na brzegu plastra i powoli odzepić okularki od plastra.

2. **Usuwanie plastrów:** Nawilżyć plaster wodą. Delikatnie unieść brzeg plastra oraz nawilżać go od spodu w trakcie odlepiania.

**Uwagi:** Po zdjęciu okularków plastry należy zawsze usuwać. Usuniętego plastra nie należy używać ponownie. Okularki stosuje się wyłącznie pod stałą kontrolą wykwalifikowanego personelu medycznego.

Produkt jednorazowego użytku



Patent #D410,021; Other International & Domestic Patents Pending

## NeoShades® – z opaską mocującą

Okularki ochronne do fototerapii z unikalnym wzorem okularów słonecznych



### Właściwości i zalety

- Nowy, cieńszy, bardzo miękki materiał zapewnia pełen komfort oraz bezpieczeństwo
- Większe blokowanie światła UV
- Zapewnia większe bezpieczeństwo oraz redukuje czas pielęgnacji pacjenta
- Mocowanie za pomocą bezpiecznej opaski wykonanej z NeoFoam zapobiegającej zsuwaniu się


Nr katalogowy	Rozmiar	Ilość w
N727	Mikro / Micro	50 szt. / op.
N728	Mały / Small	50 szt. / op.
N729	Duży / Large	50 szt. / op.

Specjalny kształt zapewnia idealne dopasowanie w zależności od o różnych rozmiarów głowy



Patent #D410,021; Other International & Domestic Patents Pending

## NeoShades® z opaską mocującą – wskazówki stosowania

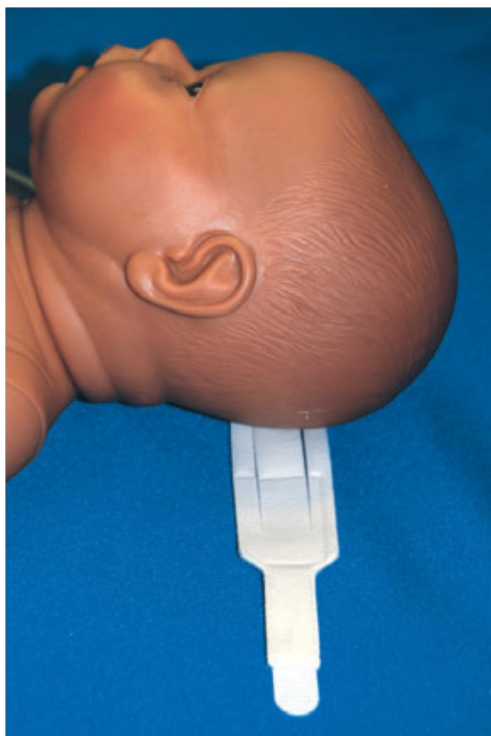

### Krok 1

Wybierz rozmiar odpowiedni dla pacjenta.

### Krok 2

Umieść opaskę mocującą z tyłu, za głową dziecka, pianką antypoślizgową od strony włosów.

### Krok 3

Ostoń oczy dziecka okularkami NeoShade.

### Krok 4

Delikatnie przymocuj zapięcie rzepowe na końcu opaski mocującej do okularków NeoShades.

### Krok 5

Powtórz tę czynność z drugiej strony.

**Ważne:** Opaski można przycinać dla lepszego dopasowania.

**Uwaga:** Pamiętaj, że NeoShades należy stosować pod ścisłą kontrolą wykwalifikowanego personelu medycznego.



Produkt jednorazowego użytku

Patent #6,958,050; #7,635,361;  
#D474,269; #D590,056; Other International  
& Domestic Patents Pending

