

NeoSmile™

Hydrokoloidowa osłonka czujnika temperatury



Właściwości i zalety

- Osłonka czujnika temperatury, która przylega do ciała pacjenta dzięki hydrokoloidowemu plasterowi NeoBond
- Odporna na wilgoć oraz temperaturę
- Utrzymuje się długo na skórze

Nr katalogowy	Średnica	Ilość
N731	25,4 mm	150 szt. / op.



NeoSmileTM – wskazówki stosowania



Krok 1

Oczyszczyć i osuszyć skórę zgodnie z procedurami szpitalnym.

Uwaga: Aby osłona dobrze przylegała, ważne jest dokładne oczyszczenie i osuszenie skóry. Wilgoć, olejki i balsamy utrudniają przyleganie hydrożelu do skóry.

Nie stosować alkoholu.

Krok 2

Nie zdejmując przezroczystej folii ogrzać produkt trzymając go w dłoniach przez 60 sekund lub w inkubatorze.

Krok 3

Zerwać folię z osłony NeoSmileTM.

Krok 4

Umieścić NeoSmileTM w odpowiednim miejscu na skórze. Przytrzymać palcem w miejscu przez co najmniej 60 sekund, aby zapewnić dobre przyleganie. Ciepło wpływa na lepsze wiązanie między produktem a skórą pacjenta.

Krok 5

Usuwanie: Nawilżyć powierzchnię wodą, delikatnie odrywać od skóry zwilżając wacikiem nasączonym wodą.

Uwagi: Pacjent musi być pod profesjonalnym nadzorem.

Natychmiast przerwać, jeśli wystąpi podrażnienie skóry. Produkt powinien być stosowany przez lekarza lub na jego zlecenie

Produkt jednorazowego użytku